

■ Réinitialiser la date ou l'heure

De temps à autre, vous aurez besoin de modifier les réglages de date et d'heure (par ex., pour observer l'heure d'été ou d'hiver, ou après avoir réinitialisé le PDM). Par mesure de sécurité, vous ne pouvez changer les réglages de date et d'heure que lorsque le pod est désactivé, ou quand l'administration d'insuline est suspendue (voir Chapitre 5, Utilisation du pod).

1. Suspendez l'administration d'insuline.



Si vous remplacez le pod, vous pouvez réinitialiser la date et l'heure sans suspendre l'administration d'insuline, en changeant la date ou l'heure avant d'activer le nouveau pod.



2. Dans l'écran **Accueil**, utilisez les touches de la **commande haut/bas** pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Sélectionnez **Configuration système**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Sélectionnez **Date/heure**, puis appuyez sur **Sélect**.
5. Sélectionnez **Date** ou **Heure**, puis appuyez sur **Modif**.

Réinitialiser l'heure

1. Pour entrer l'heure actuelle, appuyez sur les touches de la **commande haut/bas**. Appuyez et maintenez la touche

enfoncée pour augmenter ou diminuer plus rapidement l'heure.

2. Appuyez sur **12/24 h** pour sélectionner un format d'horloge à 12 heures ou 24 heures, puis appuyez sur **Entrer** (Figure 6-4).

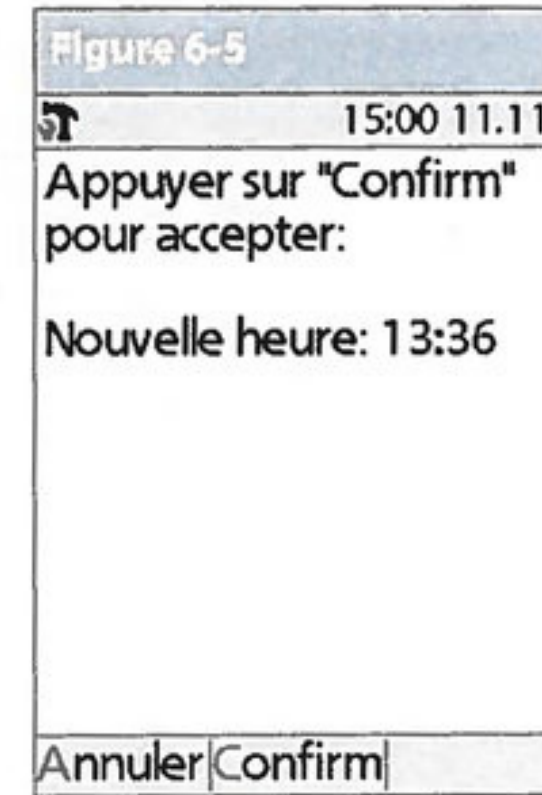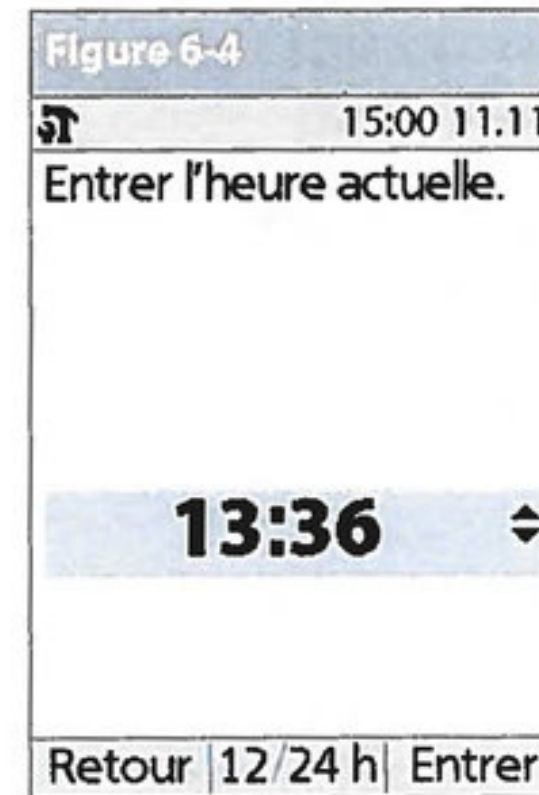

3. Appuyez sur **Confirm** pour accepter la nouvelle heure (Figure 6-5).