



Régler l'heure et la date

Après la première mise sous tension de votre pompe, réglez l'heure et la date. Vérifiez toujours que l'heure et la date définies sur votre pompe sont correctes. L'administration de l'insuline peut être affectée par un mauvais réglage de l'heure et de la date.

Comment accéder au menu Heure et Date sur votre pompe :

- 1 Appuyez sur le bouton Écran activé/Bolus rapide
- 2 Déverrouillez l'écran en appuyant sur les touches 1-2-3 dans l'ordre
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur OPTIONS
- 4 Appuyez sur la flèche vers le bas pour passer sur l'écran suivant puis sélectionnez " Réglages dispositif" et "Heure et Date"
- 5 Appuyez sur « Modifier l'heure »
- 6 Appuyez sur la fonction « Mode 24 heures» en faisant glisser
- 7 Appuyez ensuite sur « Heure »
- 8 Un clavier numérique apparaît, qui permet de régler les heures puis les minutes. EX : 14h26mn je tape successivement sur le 1, 4, 2 et enfin 6.
- 9 J'appuie sur  pour passer à l'étape suivante.
- 10 J'appuie sur  pour sauvegarder le réglage de mon heure.
- 11 L'écran « REGLAGE SAUVEGARDE» s'affiche temporairement

