


Réglage de l'heure et de la date

Il est nécessaire de régler correctement la date et l'heure de la pompe pour administrer et enregistrer des doses d'insuline précises et assurer un bon fonctionnement de la pompe. Vous pouvez régler l'heure sur le format 12 ou 24 heures. L'heure et la date doivent être réinitialisées lorsque l'alarme VERIF. REGLAGES retentit ou lorsque la fonction Effacer réglages est activée.

- 1 Aller à l'écran REGLAGE HEURE/DATE.

Menu Principal > Menu Fonctions > Heure/Date

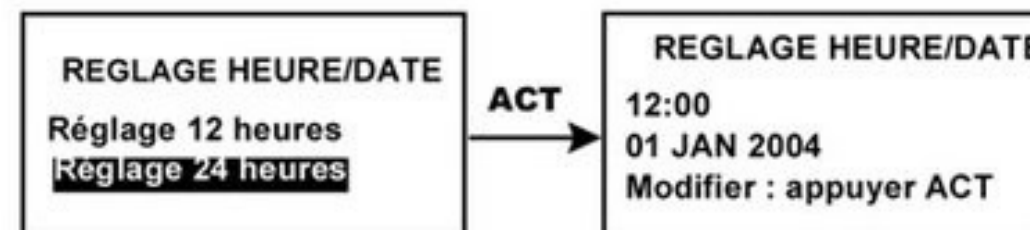

- 2 Sélectionner **Réglage 12 heures** ou **Réglage 24 heures** et appuyer sur ACT.
- 3 Appuyer à nouveau sur ACT pour modifier les réglages.
- 4 Modifier chacun des réglages comme suit :

Heure	Minutes	Année	Mois	Jour
REGLER HEURE 00:00	REGLER MINUTES 15:42	REGLER ANNEE 2004	REGLER MOIS 01	REGLER JOUR 01
Modifier l'heure. Appuyer sur ACT. Pour le réglage 12 heures, appuyer sur ▼ / ▲ jusqu'à ce que le symbole A (matin) ou P (après-midi) apparaisse.	Modifier les minutes. Appuyer sur ACT.	Modifier l'année. Appuyer sur ACT.	Modifier le mois. Appuyer sur ACT.	Modifier le jour. Appuyer sur ACT.

- 5 L'écran POMPE REGLEE A affiche les réglages programmés. Appuyer sur ACT et quitter les menus.

Les réglages de l'heure et de la date sont terminés.

